



DIENPI
— Safe —
SCHEMA TECNICA

Prodotto e distribuito da
Dienpi srl:
Via Pontida 7, 63074
San Benedetto del Tronto (AP)

Tel. 0735/751060
www.dienpi.com
mascherine@dienpi.com

CLEAR MASK

SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR TRASPARENTE



CE 2761

Regolamento (UE) 2016/425

Descrizione prodotto:

La semimaschera filtrante **Clear Mask** è un dispositivo di protezione individuale (DPI) FFP2 NR in accordo al Regolamento UE 2016/425 per la lettura del labiale da impiegare per tutte le attività in cui si hanno interazioni con soggetti sordi e/o ipoacusici, per impieghi specifici sanitari e lavorativi in genere.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali:

E' stata studiata e realizzata un'idonea composizione di cinque materiali che consente un'ottimale sistema filtrante

TNT doppio strato (tessuto non tessuto)
MELT BLOW doppio strato
AIR COTTON

PET (trasparente anti-fog)
NASELLO (in metallo e ricoperto)
ELASTICI (in elastomero e poliestere)

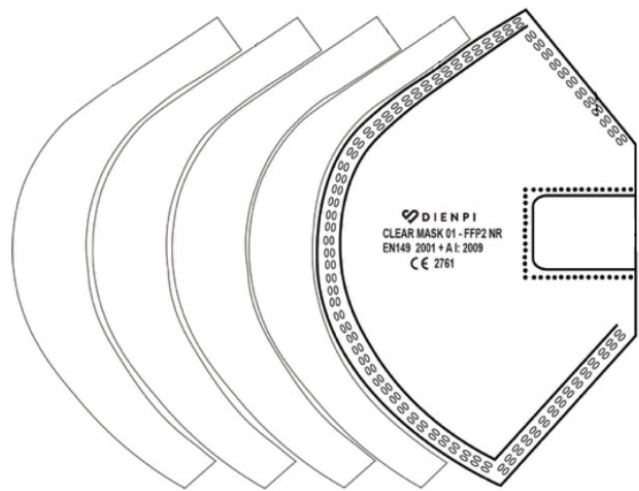

5 STRATI DI MATERIALI FILTRANTI

CONDIZIONI D'USO

Il dispositivo FFP2 NR **CLEAR-MASK** è indispensabile per consentire alle persone sorde / ipoacusiche, l'accesso ad informazioni chiare in tutti i contesti quotidiani e/o sanitari. E' particolarmente adatto per tutte le attività in cui si hanno interazioni con soggetti sordi ed ipoacusici e per tutte le attività correlate a queste problematiche.

Il dispositivo è monouso.

Prima dell'uso, controllare il dispositivo in ogni sua parte per verificare la presenza di fori, strappi o qualsiasi tipo di deterioramento. In presenza di eventuali danneggiamenti, non utilizzare. Prenderne uno nuovo.


PARTICOLARITA' DEL DISPOSITIVO

Per il dispositivo Clear Mask è stata depositata la domanda di Brevetto n 102022000001760 in quanto presenta soluzioni innovative nella sua struttura e nei processi di assemblaggio tali da conferire un comfort migliore durante il suo utilizzo ed una ottima efficienza.



COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

1. Dopo aver aperto la confezione, prendere la semi-maschera, appoggiarla sul palmo della mano, farla aderire ai contorni del viso.
2. Posizionare la semi-maschera, al fine di una buona aderenza al viso, sulle curve del naso e sotto il mento con la lamina stringinaso in alto.
3. Posizionare gli elastici dietro le orecchie.
4. Modellare la lamina stringinaso alla conformazione del naso stesso. Verificare la tenuta della semi-maschera primadi entrare nell'ambiente/area di lavoro con la prova di tenuta, ispirando ed espirando profondamente. Se si percepiscono fughe d'aria, riposizionare la semimaschera.

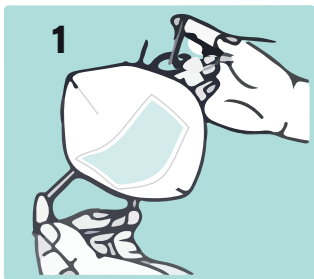

IMBALLAGGIO

Le semimaschere sono imbustate singolarmente e sono vendute in scatole da 10 pezzi.

CE 2761

Regolamento (UE) 2016/425

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



100% ITALIANO

IDEATO E REALIZZATO IN ITALIA



Rating di legalità

